

ANDROVAC PLUS

El sistema crea un vacío alrededor del pene suficiente para ayudar al flujo natural de la sangre en el pene. La mayoría de los hombres también tendrán que utilizar uno de los anillos de soporte para mantener su erección.

Uno de los pasos más importantes es la colocación correcta del anillo de soporte. Para evitar que la sangre escape del pene, el anillo debe permanecer cómodamente apretado, pero no más de lo necesario. Si el sistema de terapia de vacío, no le da una buena erección, debe probar con otro anillo de menor diámetro. Treinta minutos es el tiempo máximo recomendado para usar el anillo de apoyo. Si se usa más, es posible un daño permanente.

MODO DE USO:

1. Dependiendo del tamaño en la parte final del cilindro de vacío, si es muy grande, usted podrá introducir uno de los dos adaptadores y así determinar qué tamaño le permite tener un mejor resultado.
2. Luego, proceda a colocar el anillo de constricción, en la parte final del cilindro de vacío. Para esto, debe sostener el cilindro de vacío entre las rodillas y colocar el anillo en el cono, luego desplazarlo hasta la parte final del cilindro.
3. Coloque lubricante tanto en la parte interior como fuera del cilindro de vacío, de igual manera en el anillo de constricción. Es recomendable lubricar suficientemente el pene.
4. Previo a su uso, debe unir el cilindro a la bomba eléctrica y posteriormente deslizar el botón a la posición de encendido y graduar a la intensidad requerida.
5. Coloque el pene dentro del cilindro y haga funcionar la bomba de vacío, hasta que el pene alcance un estado de óptima rigidez.
6. Sostenga la bomba y el cilindro de vacío en una mano, y con la otra empuje el anillo de constricción fuera del cilindro, hacia la base del pene, y luego se retira el cilindro. Si el anillo no es suficiente para mantener la erección, use un anillo de menor diámetro o dos juntos (muy excepcionalmente).
7. Para quitarse el anillo, tire hacia fuera y deslícelo fuera del pene.

Advertencia: El anillo de constricción no debe ser utilizado más de 30 minutos. Si desea que la erección dure más tiempo, puede quitar el anillo durante unos minutos y luego repita el proceso.

www.biotecnimed.com

ventas@biotecnimed.com

Fonos: +56 228002537 / +56 994842561